



AB GERMA

- a company in the ferno norden group –

INSTRUKTION EASYLIFT SHOULDER

Easylift är ett hjälpmedel som är utvecklat för att avlasta framför allt händer och armar vid tyngre lyft. Fördelen är att vid snabbt uppkommet behov släpper man handtaget precis som vid lyft utan Easylift. Var noggrann med att följa instruktionen för säker avlastning av tyngre lyft eller vid lyft över längre avstånd.



1. Ta på selen med spännena på framsidan.



2. Se till att "krysset" ligger rätt på ryggen.



3. Placera långfingret i fickan längst ner på remmen på respektive sida. Justera så att du har lätt böjda armar.



4. Fatta handtaget lite längre in än normalt.



5. När du knyter handen kommer ev. fingret att glida ur fickan, detta gör inget för fickan är bara till för att styra remmen i början



6. På remmen längst ner finns det ett kardborre påsytt, viker du upp remmen och fäster den kan du ha den på under västen/jackan utan att den syns eller är i vägen. Om du får för mycket rem över, så trä med fördel in den i karbinen så är den inte i vägen.

Distribution: **fermo norden ab**
"Caring for those who care"

Address
Box 2127
SE-291 02 Kristianstad
SWEDEN
info@germa.se
www.germa.se

Street
Industrigatan 54-56

Phone
+46(0)44123030

Telefax
+46(0)44103179

Organisation number
556086-9413